

Wichtiger Hinweis:

Die S-Monovette® cfDNA Exact enthält eine vorgelegte, gesundheitsschädliche Stabilisatorlösung. Ein Rückfluss aus dem Röhrchen muss daher unbedingt vermieden werden, dafür bitte folgendes beachten:

- **S-Monovette® cfDNA Exact senkrecht unterhalb des Armniveaus halten, damit die chemischen Zusatzstoffe nicht während der Abnahme mit dem Blut oder dem Verschluss des Röhrchens in Verbindung kommen.**
- **Blutentnahme mindestens über eine 21 G-Kanüle, langsame Entnahme ist essentiell**
- **Stellen Sie sicher, dass die Zusatzstoffe weder mit dem Stopper noch mit der Nadel in Berührung kommen.**
- **Die Venenstaubinde nicht lösen, während die S-Monovette® cfDNA Exact konnektiert ist, nur vorher.**

Durchführung der Blutabnahme:

1. Mit Ausnahme der o.g. Besonderheiten erfolgt die Blutabnahme nach gängiger Praxis (Aspirationstechnik oder Vakuumtechnik) auch bezüglich Hygienemaßnahmen und Sicherheit.
2. Befüllen Sie zunächst ein Leer- oder Verwerfröhrchen bzw. weitere Röhrchen. Die S-Monovette® cfDNA Exact sollte **immer als letztes Röhrchen** befüllt werden.
3. **Nach der Blutabnahme schwenken Sie das Röhrchen unverzüglich 5-mal (180 Grad) vorsichtig über Kopf.** (Abb.2, bei einem unzureichenden oder verspäteten Vermischen des Vollblutes mit den chemischen Zusatzstoffen kann es zu ungenauen Testergebnissen kommen.).

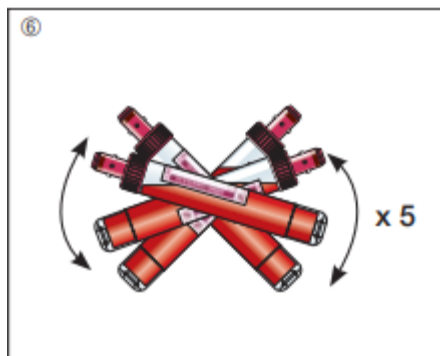


Abb.2: Bitte Gebrauchshinweise beachten, siehe: <https://www.sarstedt.com/produkte/diagnostik/venenblut/s-monovette/produkt/01.2040.001/>

Dok-ID	PATHO-AA-022572-002	Schutzklasse	Intern	Dok-Art	AA
UKA-ID	DE.UKAACHEN.FUNDUS-PROD.PATHO-AA-022572-002	Gültig ab	26.05.2026	Version	002
Alias	Anlage 33	Nächste Revision	26.05.2028	Status	freigegeben